

EGM  
GROUPE EVRARD

GATE

REHAB DEVELOPMENT AB



Amfibi™

Easy™

Chaises de douche et de toilettes





# EASY™

## Chaise de douche et de toilettes

**L'avantage des chaises de douche et de toilettes Gate est de s'adapter aux besoins de chaque personne et à toutes les situations. Réglez la hauteur du siège manuellement ou électriquement, ajustez l'angle du siège avec la fonction inclinaison et personnalisez avec des accessoires.**

### Conçues pour répondre aux besoins

Les chaises de douche et de toilettes Gate ont été conçues pour régler la hauteur du siège rapidement et simplement. Easy™ convient à la plupart des utilisateurs quelle que soit leur taille, et sans perte inutile de temps et d'énergie pour le personnel soignant à la recherche d'une chaise de douche et de toilettes adaptée à chaque situation.

### Amélioration de la vie quotidienne

Il va sans dire qu'EASY™ ne transige jamais entre le confort de l'utilisateur et l'ergonomie du personnel soignant. Son confort et ses fonctionnalités adaptables à chaque individu rendent la chaise de douche et de toilettes très agréable à utiliser, que ce soit pour le patient ou pour le personnel soignant. EASY™ est fabriquée à partir de matériaux anticorrosion et son moteur peut résister au nettoyage haute pression à l'eau chaude (IPx5).

### Le meilleur confort possible

Les utilisateurs restent souvent longtemps assis pendant leur toilette ou le moment de la douche, et cette position peut devenir très pénible. EASY™ a été créée pour procurer un confort extrêmement élevé. L'utilisateur d' EASY™ bénéficie du meilleur confort possible en position assise. La chaise de douche et de toilettes s'adapte rapidement pour un réglage personnalisé grâce à ses fonctions faciles d'utilisation. De plus, la hauteur d'assise est réglable sur tous les modèles.

Le dossier et l'assise sont adaptés pour une position assise droite qui ne comprime pas le pelvis. Le design ergonomique réduit la pression sur les hanches, les tendons et les vaisseaux sanguins. Le dossier souple et hydrophobe est unique à Easy™, il apporte le meilleur confort et la meilleure hygiène possible. Il est facilement ajustable pour obtenir un meilleur maintien et la profondeur d'assise appropriée.

#### Quel modèle correspond à vos besoins ?

Un large choix de modèles rend possible la création d'un parc complet de chaises de douche et de toilettes. Parce que tous les modèles peuvent convenir à la plupart des utilisateurs quelle que soit leur taille ou leur poids, le nombre de chaises et de types de chaises peut être réduit, permettant l'acquisition d'un ou deux modèles plus élaborés, spécifiques à des situations de soins particuliers.

Les chaises de douche et de toilettes Gate sont disponibles en deux versions différentes.

Easy est notre modèle le plus évolué et le plus polyvalent : il est réglable en hauteur et en inclinaison. Amfibi XL a été conçu pour les patients plus lourds.



# CHAISE DE DOUCHE ET DE TOILETTES

## Inclinaison et hauteur variable électriques

**EASY™ SoftBack**

Cette chaise de douche est équipée d'un dossier en tissu rembourré et réglable en tension, qui apporte confort et maintien, tout en soulageant les proéminences osseuses.

EASY™ a été conçue avec un système de colonnes télescopiques afin de permettre un accès plus aisé au personnel soignant.

### Appui-tête réglable

Easy SB est dotée d'un appui-tête réglable en hauteur et en profondeur pour un soutien confortable et un réglage personnalisé.

### Siège intégré avec découpe à l'arrière

L'assise au toucher chaud à la fois résistante et lisse a été conçue pour améliorer le confort du patient. La découpe à l'arrière permet au personnel soignant de travailler d'une manière plus hygiénique.

### Plastique ou métal

Un support bassin est disponible dans la gamme d'accessoires.

**NB :** le support existe en différentes versions pour s'adapter aux bassins en plastique ou en métal.

### Repose-pieds escamotables

Ils sont ajustables, escamotables, amovibles et équipés en standard de cales talonnières pour éviter que les pieds du patient glissent en position inclinée.

### Hauteur d'assise variable

Avec une hauteur d'assise variable de 53 à 93 cm, la chaise s'adapte à chaque patient tout en réduisant la charge de travail du personnel soignant.

### Roue à blocage directionnel (diam. 125 mm)

La roue avant droite est équipée d'un blocage directionnel.

### Roues verrouillables

Toutes les roues de la chaise sont verrouillables.

### Dossier réglable en tension

Le dossier réglable en tension, par son confort et sa souplesse, réduit la pression sur les points d'appui et les os. Il est facilement réglable pour un meilleur maintien et une profondeur d'assise. Lavable en machine.

### Accoudoirs verrouillables

Les accoudoirs peuvent être escamotés vers le haut et verrouillés en position basse pour des raisons de sécurité lorsque la chaise est inclinée.

### Fonction inclinaison

Easy™ s'incline de 5° en avant et 30° en arrière ce qui facilite l'accès pour l'hygiène intime et permet aux patients de s'asseoir et de se relever plus facilement. La fonction inclinaison améliore l'environnement de travail et réduit l'effort demandé aux soignants.



### Un contrôle simple

Les réglages de hauteur et d'inclinaison sont dissociés. Télécommande IP65.

### Colonnes télescopiques

Le système de colonnes télescopiques en aluminium a été conçu de façon à permettre le passage et l'évacuation naturelle des liquides.

**Longueur max :** en position relevée 105 cm, en position inclinée 150 cm

## Caractéristiques techniques

CE Marquage CE conformément à la norme MDD 93/42/EEC.

N° d'article	Désignation	Largeur totale	Poids max. utilisateur	Hauteur d'assise	Largeur entre les accoudoirs	Profondeur d'assise	Inclinaison
56-270	EASY™ SB	65 cm	150 kg	53-93 cm	50 cm	45 cm	5° vers l'avant   30° vers l'arrière

**NOUVEAU  
MODÈLE**

# CHAISE DE DOUCHE ET DE TOILETTES

Inclinaison et hauteur variable électriques

**EASY™ HighBack**

Cette chaise de douche est équipée d'un dossier haut en mousse avec un appui-tête intégré, l'ensemble protégé par un revêtement hydrofuge. Ce dossier doux et confortable, assure en même temps un bon maintien. EASY™ a été conçue avec un système de colonnes télescopiques afin de permettre un accès plus aisé au personnel soignant.

**Appui-tête intégré**

Il est ajustable en hauteur et existe en taille M et L



**Un contrôle simple**

Les réglages de hauteur et d'inclinaison sont dissociés. Télécommande IP65.

**Dossier haut et rembourré**

Le dossier haut apporte un support stable et souple. Il se nettoie facilement et peut être démonté si nécessaire.

**Fonction inclinaison**

Easy™ s'incline de 5° en avant et 30° en arrière ce qui facilite l'accès pour l'hygiène intime et permet aux patients de s'asseoir et de se relever plus facilement. La fonction inclinaison améliore l'environnement de travail et réduit l'effort demandé aux soignants.

**Accoudoirs verrouillables**

Les accoudoirs peuvent être relevés et bloqués pour faciliter les transferts du patient.

**Colonnes télescopiques**

Le système de colonnes télescopiques en aluminium a été conçu de façon à permettre le passage et l'évacuation naturelle des liquides.

**Support lombaire souple**

La partie basse du dossier est montée avec un support lombaire souple pour diminuer les tensions sur le dos du patient.



**Repose-pieds amovibles, ajustables et escamotables**

Ils sont réglables en hauteur et équipés de cales talonnières pour éviter aux pieds du patient de glisser lorsque le fauteuil est incliné vers l'arrière (équipement standard).

**Siège intégré avec découpe à l'arrière**

L'assise à la fois résistante et lisse a été conçue pour améliorer le confort du patient. La découpe à l'arrière permet au personnel soignant de travailler d'une manière plus hygiénique.

**Roue à blocage directionnel (diam. 125 mm)**

La roue avant droite est équipée d'un blocage directionnel.

**Roues verrouillables (diam. 125 mm)**

Les roues sont équipées d'un freinage individuel.

**Longueur max :** en position relevée 105 cm, en position inclinée 150 cm

Caractéristiques techniques

CE Marquage CE conformément à la norme MDD 93/42/EEC.

N° d'article	Désignation	Largeur totale	Poids max. utilisateur	Hauteur d'assise	Largeur entre les accoudoirs	Profondeur d'assise	Inclinaison
56-271	EASY™ HB	65 cm	150 kg	53-93 cm	50 cm	45 cm	5° vers l'avant   30° vers l'arrière



**JUSQU'À  
250 KG !**

# CHAISE DE DOUCHE ET DE TOILETTES

Hauteur variable électrique

**Amfibi XL**

Amfibi XL a été conçue pour les patients plus lourds, c'est pourquoi elle offre un espace plus large, et est plus résistante. Elle est dotée de la fonction de réglage électrique de la hauteur.  
Le poids maximum utilisateur est de 250 kg.

### Spacieuse

Le poids maximum utilisateur pour Amfibi XL est de 250 kg, et la largeur d'assise est plus importante que pour la chaise standard. Cette chaise de douche et de toilettes comporte également un espace entre accoudoirs plus important (67 cm) pour offrir plus d'espace et une bonne stabilité.

### Accoudoirs verrouillables

Les accoudoirs d'Amfibi XL peuvent être escamotés vers le haut et verrouillés dans cette position pour faciliter les transferts en position relevée.

### Assise souple intégrée

L'assise d'Amfibi XL est adaptée pour une position assise droite qui ne comprime pas le pelvis. L'assise souple ergonomique en polyuréthane est intégrée à la chaise en version standard. Elle permet de diminuer la pression sur les hanches, les tendons et les vaisseaux sanguins, et est conçue pour convenir à la fois aux hommes et aux femmes.

### Facile à nettoyer

L'assise est facile à retirer et à nettoyer. La partie avant est arrondie pour améliorer le confort et la position des jambes.

### Repose-pieds escamotables et amovibles

Les repose-pieds rabattables et escamotables se retirent facilement.

Le bassin et le support bassin sont disponibles en option.

### Contrôle facile

Pressez simplement les boutons monter / descendre et d'inclinaison pour manipuler la chaise. La commande filaire est hermétiquement gainée (IP65), pour une sécurité optimale.

### Dossier réglable en tension

Le dossier réglable en tension, par son confort et sa souplesse, réduit la pression sur les points d'appui et les os. Il est facilement réglable pour le meilleur maintien et profondeur d'assise. Lavable en machine.

### Roues verrouillables et blocage de direction

L'une des roues peut être bloquée en position "directionnel" et ainsi accroître la sécurité pendant les transferts. Les autres roues sont verrouillables.

Réglage électrique de la hauteur de 55 à 81 cm facilitant le travail du soignant.



## Caractéristiques techniques

CE Marquage CE conformément à la norme MDD 93/42/EEC.

N° d'article	Désignation	Largeur totale	Poids max. utilisateur	Hauteur d'assise	Largeur entre les accoudoirs	Profondeur d'assise
56-204	Amfibi XL	79 cm	250 kg	55-81 cm	67 cm	49 cm

# Accessoires

**Kit élargissement accoudoirs**  
Permet d'augmenter la largeur entre les accoudoirs de 5 cm (2,5 cm de chaque côté).

**Ceinture pour la taille ou les cuisses**

**Support bassin**  
Permet de fixer le bassin avec couvercle.


**Bassin avec couvercle**

**Barre de sécurité**  
Permet de sécuriser le patient.


**Coussin avec appuis latéraux**  
Apporte plus de confort et surtout un meilleur maintien aux personnes de petit gabarit.

**Support pour membre amputé ou appui-mollet**  
Réglable en angle et en longueur.

**Pare-éclaboussures**

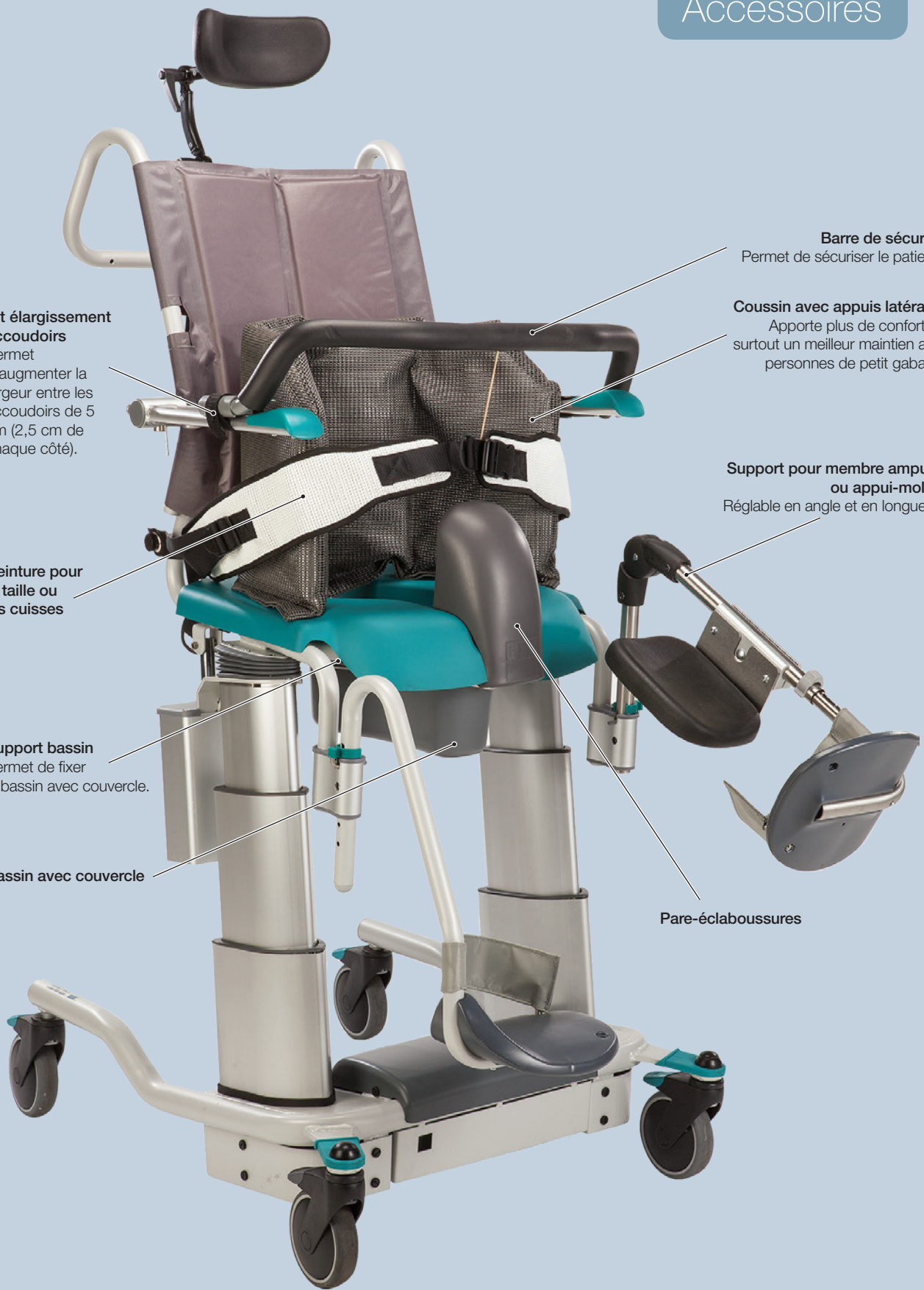

## Liste des accessoires

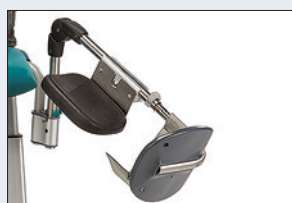

Réf. : 56-259  
Support pour membre amputé /  
Appui-mollet



Réf. : 56-212  
Barre de sécurité



Réf. : 56-221  
Kit d'élargissement accoudoirs  
(+ 5 cm)



Réf. : 56-218  
Support bassin



Réf. : 56-361  
Roue avec frein  
Diamètre : 125 mm



Réf. : 56-359  
Roue avec blocage directionnel  
Diamètre : 125 mm



Réf. : 56-258  
Dossier SoftBack



Réf. : 56-217  
Ceinture



Réf. : 56-232  
Bouchon pour siège souple (56-206)



Réf. : 56-216  
Coussin avec appuis latéraux



Réf. : 56-205  
Assise de douche en plastique vert



Réf. : 56-234  
Assise souple en PU en 2 parties



Réf. : 56-206  
Coussin confort



Réf. : 56-236  
Coussin plein confort



Réf. : 56-213  
Pare-éclaboussures



Réf. : 56-209  
Bassin avec couvercle

Désignation	Référence	EASY™ SB	EASY™ HB	Amfibi XL
Support pour membre amputé / Appui-mollet - XL - Droit	56-228-R			●
Support pour membre amputé / Appui-mollet - XL - Gauche	56-228-L			●
Support pour membre amputé / Appui-mollet - EASY - Droit	56-259-R	●	●	
Support pour membre amputé / Appui-mollet - EASY - Gauche	56-259-L	●	●	
Barre de sécurité - EASY	56-212-EASY	●	●	
Barre de sécurité - XL	56-212-XL			●
Kit d'élargissement (+ 5 cm) EASY SB	56-221-EASYSB	●		
Kit d'élargissement (+ 5 cm) EASY HB	56-221-EASYHB		●	
Support bassin	56-218	●	●	●
Coussin avec appuis latéraux	56-216	●	●	●
Roue avec frein 125 mm	56-361	●	●	
Roue avec blocage directionnel 125 mm	56-359	●	●	
Dossier SoftBack EASY™	56-258-EASY	●		
Dossier SoftBack AMFIBI XL	56-258-XL			●
Ceinture	56-217	●	●	●
Bouchon pour siège souple (56-206)	56-232	●	●	
Assise de douche en plastique vert	56-205	●	●	
Assise souple en PU en deux parties	56-234	●	●	
Coussin confort	56-206	●	●	
Coussin plein confort	56-236	●	●	
Pare-éclaboussures	56-213	●	●	●
Bassin avec couvercle	56-209	●	●	●





GROUPE EVRARD

ZA du haut Serroir | 54690 Lay-Saint-Christophe  
Tél. : +33 (0)3 83 22 67 76 | Fax : +33 (0)3 83 22 64 01  
[www.evrardmedicale.fr](http://www.evrardmedicale.fr) | [info@evrardmedicale.fr](mailto:info@evrardmedicale.fr)

