



Etac Clean

Chaises de douche et de toilettes mobiles

Clean - Un classique récompensé

La chaise de douche et de toilettes mobile Clean est sans conteste l'un des d'Etac. Introduite en 1999, elle s'est référencée pour les futures chaises de douche et de toilettes et l'est toujours à ce jour. Ses excellentes caractéristiques en termes d'hygiène et de facilité d'utilisation contribuent à sa popularité dans les établissements de soins ainsi qu'à domicile et ce, dans le monde entier.

Facile à diriger et manœuvrer

L'exceptionnelle maniabilité de la chaise Clean est l'une de ses caractéristiques majeures. Sa conception compacte lui permet de franchir aisément les seuils de porte ou de s'adapter aux espaces réduits. La grande poignée de poussée permet à l'utilisateur d'adapter sa prise en main, ce qui facilite grandement l'utilisation de la chaise pour le soignant.

Flexibilité et facilité d'utilisation

Clean offre d'excellentes fonctionnalités, sans complications inutiles. Les accoudoirs peuvent être retirés en les dépliant simplement afin de faciliter les transferts et les freins sont faciles d'accès pour un verrouillage et un déverrouillage aisés. Le repose-pieds ergonomique est unique et peut être déplié ou rangé sous la chaise lorsqu'il n'est pas utilisé.

De nombreuses options pour divers utilisateurs

La gamme Clean est composée de trois modèles et de nombreuses variantes, présentant toutes des caractéristiques uniques pour s'adapter de manière optimale aux divers besoins des utilisateurs.



Caractéristiques



Compacte, mais spacieuse

La chaise est compacte, tout en offrant une zone d'assise généreuse et confortable pour l'utilisateur.



Accès aisé pour les soins personnels

L'assise standard est ouverte à l'arrière et présente une découpe à l'avant afin de faciliter l'accès pour les soins d'hygiène. Une version avec assise ouverte à l'avant est également disponible.



Convient à divers modèles de toilettes

La chaise se positionne très près du mur et s'adapte parfaitement, même sur des toilettes suspendues, grâce à son châssis vertical.



Repose-pieds ergonomique

Le repose-pieds pratique présente une forme légèrement galbée pour un meilleur confort et pour épouser la voûte plantaire.



Clean bénéficie d'une garantie de 5 ans et d'une durée de vie utile de 10 ans.

Chaise de douche et de toilettes Clean

	Blanc	Vert lagon
44 cm (17¼"), 4 roulettes verrouillables	80229269	80229209
49 cm (19¼"), 4 roulettes verrouillables	80229270	80229210
49 cm (19¼"), 2 roulettes verrouillables	80229273	80229213
55 cm (21¾"), 4 roulettes verrouillables	80229271	80229211
55 cm (21¾"), 2 roulettes verrouillables	80229274	80229214
60 cm (23½"), 2 roulettes verrouillables	80229275	80229215

Chaise de douche et de toilettes Clean, conditionnement par deux

	Blanc	Vert lagon
49 cm (19¼"), 4 roulettes verrouillables, conditionnement par deux	80209304	80229220
49 cm (19¼"), 2 roulettes verrouillables, conditionnement par deux	80229283	80229223
55 cm (21¾"), 4 roulettes verrouillables, conditionnement par deux	80229281	80229221
55 cm (21¾"), 2 roulettes verrouillables, conditionnement par deux	80229284	80229224

Poids maximal de l'utilisateur

130 kg

Poids

44 cm : 13,5 kg
49 cm : 14,0 kg
55 cm : 14,5 kg
60 cm : 15,0 kg

Matériaux

Châssis : tube en acier laqué époxy
Assise/dossier : polypropylène
Accoudoirs : polypropylène
Repose-pieds : polypropylène
Supports des roulettes : polyamide
Roulettes : polyamide/TPE

Maintenance



Nettoyage manuel : nettoyer le produit avec un agent de nettoyage sans solvant dont le pH est compris entre 6 et 9 ou avec une solution désinfectante à 70 %.
Nettoyage en machine : le produit peut être nettoyé dans un laveur-désinfecteur armoire à 85 °C maximum pendant 3 minutes.



Clean à hauteur variable

Le modèle Clean à hauteur variable peut être réglé à différentes hauteurs d'assise, ce qui permet de l'adapter à divers besoins des patients, par exemple pour faciliter les transferts ou pour l'adapter à un certain type de toilettes. Ce modèle peut également convenir à des établissements de soins pour lesquels une chaise doit pouvoir accueillir plusieurs utilisateurs.

Une même chaise pour toutes les hauteurs

La possibilité de régler la chaise en hauteur permet de l'adapter à différents besoins. La chaise peut être réglée à une hauteur de 60 cm maximum et aucun outil n'est nécessaire pour cela. Outre le réglage en hauteur, la chaise présente les mêmes avantages que les autres modèles de la gamme Clean.

Repose-pieds supplémentaire

Pour ce modèle, un repose-pieds différent est disponible en option. Pour en savoir plus sur les accessoires, consultez les pages 9-11.



Adaptée aux besoins de soins de demain

Selon les prévisions, avec le vieillissement de la population, les soins à domicile seront de plus en plus indispensables. Cette prévision établit des exigences élevées pour les futures aides à la toilette, car les besoins des établissements de soins et des environnements domestiques devront être comblés.

Grâce à sa conception compacte, hygiénique et hautement maniable, la chaise Clean est parfaitement adaptée aux besoins de soins de demain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.etac.com.

Clean à hauteur variable

4 roues verrouillables
4 roues verrouillables

Blanc

80229208

Vert lagon

-
80229203

Poids

14,2 kg

Poids maximal de l'utilisateur

130 kg

Matériaux

Châssis : tube en acier poudré
Assise/dossier : polypropylène
Accoudoirs : polypropylène
Repose-pieds : polypropylène
Roulettes : polyamide/TPE/tube en acier inoxydable
Tubes de réglage de la hauteur des roulettes : acier inoxydable

Maintenance



Nettoyage manuel : nettoyer le produit avec un agent de nettoyage sans solvant dont le pH est compris entre 6 et 9 ou avec une solution désinfectante à 70 %.
Nettoyage en machine : le produit peut être nettoyé dans un laveur-désinfecteur armoire à 85 °C maximum pendant 3 minutes.





Clean 24"

Pour les utilisateurs plus indépendants, Clean est également disponible en version autopropulsée. Présentant les mêmes avantages que les autres modèles de la gamme, elle offre une solution de mobilité aux utilisateurs capables de manœuvrer leur fauteuil de manière autonome.

Facile à manœuvrer

La chaise est facile à manœuvrer grâce à ses roues de 24 pouces, positionnées afin de favoriser l'activité quotidienne et de garantir le confort de l'utilisateur.

Simplifie les transferts

La large assise et l'espace disponible devant les roues facilitent les transferts vers et depuis le fauteuil. Les poignées des freins sont également positionnées de sorte à ne pas gêner pendant les transferts, tout en restant à portée immédiate.



Amélioration permanente

Comme la plupart des produits Etac, Clean a bénéficié d'améliorations continues au fil des années et, tout au long de ce processus, nous nous sommes toujours assurés que le modèle Clean classique demeure une chaise Clean *moderne*.

L'hygiène personnelle étant avant tout une question de préférences individuelles, nous savons qu'il est important de proposer diverses options. C'est pourquoi de nouveaux modèles ont également été ajoutés à la gamme.

Clean 24"

55 cm (21¾) avec roues arrière de 24"

55 cm (21¾) avec roues arrière de 24"

Blanc

80229276

-

Vert lagon

-

80229216

Poids

20,0 kg

Poids maximal de l'utilisateur

130 kg (287 lb)

Matériaux

Adaptateur de roue arrière : aluminium
Roues arrière : pneus pleins en polyamide
Châssis : tube en acier laqué époxy
Assise/dossier : polypropylène
Accoudoirs : polypropylène
Repose-pieds : polypropylène
Supports des roulettes : polyamide
Roulettes : polyamide/TPE

Maintenance



Nettoyage manuel : nettoyer le produit avec un agent de nettoyage sans solvant dont le pH est compris entre 6 et 9 ou avec une solution désinfectante à 70 %.
Nettoyage en machine : le produit peut être nettoyé dans un laveur-désinfecteur armoire à 85 °C maximum pendant 3 minutes.





De nombreuses options pour des besoins d'utilisateurs variés

De nombreuses variantes sont disponibles pour s'adapter aux besoins de chacun. Cela permet de fournir autant d'options que possible afin d'aider davantage d'utilisateurs dans leurs routines d'hygiène, selon leurs préférences.



Clean avec assise ouverte à l'avant

Une assise ouverte à l'avant peut être adaptée aux utilisateurs plus indépendants, selon leurs capacités d'amplitude de mouvement ou leurs préférences personnelles. L'accès depuis l'avant peut également faciliter les opérations pour les soignants. Ce modèle est particulièrement utile lorsque l'on utilise une douchette au lieu d'essuyer.

Disponible en tant que variante pour Clean et Clean 24".

Clean avec dossier souple

La version avec dossier souple est parfaite pour les utilisateurs ayant le dos sensible, car elle s'adapte à la colonne vertébrale et fournit un soutien pour le dos de l'utilisateur. Le dossier souple est facilement ajustable grâce à trois sangles à l'arrière.

Disponible en tant qu'accessoire.



Clean avec kit confort

Le kit confort améliore le bien-être des patients nécessitant un confort et un soutien supplémentaires. L'assise, le dossier et les accoudoirs rembourrés garantissent une assise confortable et les surfaces thermo-réfléchissantes aident à garder l'utilisateur au chaud. Le kit confort peut également accroître la sensation d'intégrité et de dignité dans des situations exposées, car il enveloppe l'utilisateur, sans réduire l'accès pour le soignant.

Disponible en tant qu'accessoire.



Clean avec dossier souple

44 cm, 4 roues verrouillables, dossier souple, support pour bassin	80229286
49 cm, 4 roues verrouillables, dossier souple, support pour bassin	80229287
55 cm, 4 roulettes verrouillables, dossier souple, support pour bassin	80229288

Blanc

80229286
80229287
80229288

Clean avec assise ouverte à l'avant

49 cm, 4 roulettes verrouillables	80229325
55 cm, 4 roulettes verrouillables	80229321
49 cm, 4 roulettes verrouillables, conditionnement par deux	80229319
55 cm, 4 roulettes verrouillables, conditionnement par deux	80229320

Vert laiton

Clean avec kit confort

49 cm, 4 roulettes verrouillables, kit confort
55 cm, 4 roulettes verrouillables, kit confort

Blanc

80229298
80229299

Clean 24" avec assise ouverte à l'avant

55 cm avec roues arrière

Vert laiton

80229327

Accessoires de personnalisation supplémentaires

Il est essentiel de pouvoir personnaliser les produits afin de stimuler les capacités et la participation aux activités quotidiennes. La gamme d'accessoires Clean offre de nombreuses options d'adaptation personnelle, qu'il s'agisse de confort, de soutien ou de fonctionnalité supplémentaire.



Confort

Un confort supplémentaire peut accroître le bien-être de l'utilisateur. Il existe plusieurs assises souples et rembourrages pour le dos et les accoudoirs.



Support et positionnement

Il est essentiel de favoriser une bonne position assise afin de stimuler les capacités des utilisateurs et d'améliorer leur sentiment de sécurité. Les options incluent diverses ceintures, une barre transversale ou des supports latéraux.



Fonctionnalités ajoutées

Certains accessoires peuvent être utilisés pour ajouter des fonctionnalités. Par exemple, divers bassins et supports de bassins sont disponibles et un porte-savon peut être clipsé sur la chaise.

Accessoires



Dossier souple

80209225


Dossier ajustable en maille souple. Fournit un confort accru pour les utilisateurs ayant besoin d'un soutien plus souple puisqu'il s'adapte aux courbes de la colonne vertébrale. Ajustement facile grâce à 3 boucles à l'arrière.



Coussin d'assise plein

80209528

Coussin d'assise plein souple pour les situations nécessitant une assise non percée. 2 cm d'épaisseur.

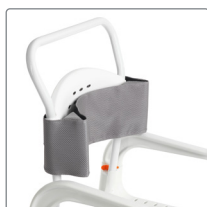

Support latéral

80209509

Support latéral rembourré pour un meilleur positionnement et un sentiment de sécurité en position assise. Ajustable en largeur. Compatible avec le dossier standard.



Coussin d'assise plein

80209247

Coussin d'assise plein lorsqu'une surface d'assise complète est requise.



Coussin de dossier souple

80209261

Un coussin de dossier pour plus de chaleur et de moelleux. Matériau thermo-réfléchissant avec surface antidérapante. Utilisé avec le dossier standard.



Coussin souple

80209260

Coussin d'assise fin et souple doté de propriétés thermo-réfléchissantes et d'une surface antidérapante. Largeur de l'ouverture : 17 cm.

Accessoires



Coussin d'assise confort souple, 2 cm d'épaisseur

80209517

Assise souple pour plus de confort. Ouverture arrondie avec découpe à l'avant pour un accès aisé. Largeur d'ouverture de 18 cm.



Coussin d'assise confort souple, 4 cm d'épaisseur

Largeur d'ouverture de 15 cm: 80209301
Largeur d'ouverture de 18 cm: 80209227
Assise souple pour plus de confort. Ouverture arrondie avec découpe à l'avant pour un accès aisé.



Coussin d'assise confort souple pour assise ouverte à l'avant

80209527

Assise confort pour une assise plus moelleuse. Compatible avec Clean avec assise ouverte à l'avant. 2 cm d'épaisseur.



Coussins d'accoudoirs confort

80209226

Fournissent un soutien souple pour les avant-bras. La surface de préhension sur l'accoudoir reste libre pour assurer une saisie ferme lors de la verticalisation.



Coussin dossier et accoudoirs confort

80209228

Dossier souple avec garnitures d'accoudoirs intégrées pour plus de confort et de soutien. Surface imperméable et thermo-réfléchissante.



Kit confort

80209237


Kit confort améliorant la sensation de bien-être et enveloppant l'utilisateur. Inclut le coussin d'assise confort 80209228 et le coussin confort souple de 4 cm (80209227).



Ceinture de hanches/pectorale rembourrée

80209524

Ceinture souple et à séchage rapide pour un soutien et un positionnement fermes. Longueur comprise entre 65 et 130 cm, ajustée avec 3 boucles. Peut être utilisée comme sangle au niveau des hanches pour tous les modèles Clean et comme sangle au niveau de la poitrine pour le dossier souple.

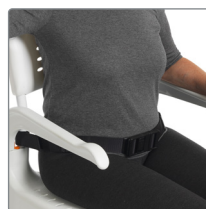

Ceinture de hanches

80209440

Fournit un soutien du bassin. Facile à ajuster à la longueur souhaitée avec une boucle en plastique. S'attache autour des tubes à l'arrière avec des attaches velcro.



Ceinture pectorale

80209442


Fournit un soutien du tronc à l'avant. Facilement réglable en longueur et s'attache autour des sangles du dossier. Il est recommandé de l'utiliser avec une ceinture de hanches. Compatible avec un dossier souple uniquement.



Ceinture de sécurité

80209034

S'attache à l'arrière du dossier. Doit toujours être utilisée avec une ceinture de hanche. Compatible avec le dossier standard.

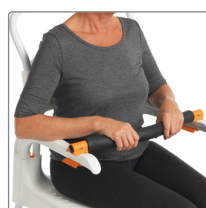

Barre transversale

80209246

Peut être utilisée pour s'agripper, s'incliner ou accroître le sentiment de sécurité de l'utilisateur. S'attache facilement aux accoudoirs.



Porte-savon

80209266

Porte-savon avec support intégré pour pommeau de douche. Peut également être utilisé pour maintenir un couvercle de bassin ou du papier toilette. Se clipse facilement sur le côté de la chaise.



Paré-éclaboussures

80209430

Fournit une protection souple à l'avant pour éviter les éclaboussures. S'attache à l'avant de la chaise et peut être facilement retiré. Peut également être tenu à la main pour un meilleur contrôle.



Bassin

Bassin et couvercle avec poignée : 80209255

Bassin uniquement : 80209254.

Couvercle uniquement : 80209256

Conception évitant les projections et simplifiant la l'écoulement. Couvercle intelligent se verrouillant automatiquement lorsque l'anse est soulevée. Le support pour bassin est à commander séparément.

Accessoires



Support pour bassin

80209257

Adapté aux bassin avec un rebord fin. Clipsé dans les supports de fixation sous la chaise inclus avec les modèles standard.



Seau avec poignée et couvercle

80209265

Seau traditionnel utilisé avec un support pour seau. Couvercle inclus. Le support pour seau est à commander séparément.



Support pour seau

80209258

Compatible avec les seaux avec poignée et couvercle et d'autres seaux avec bord épais. Clipsé dans les supports de fixation sous la chaise inclus avec les modèles standard.



Fixation pour montage en position basse du bassin/seau

80209259

Fixé au support pour bassin/seau. Abaisse le support pour bassin/seau de 6 cm.



Bassins jetables

80209282

Bassins jetables solides et fermes. 50 pièces.



Support pour bassin jetable

80209229

Support pour bassin permettant d'accueillir des bassins jetables.

Accessoires supplémentaires

Clean 49 ou 55 cm uniquement



Kit grandes roues

Gris : 80209262

Blanc : 80209305

Kit pour remplacement des roues arrière standard par des roues de 24". Compatible avec Clean 55 cm.



Kit de rehausse avec roues


Blanc : 80209511

Vert : 80209512

Cales rehaussant la hauteur d'assise de 5 cm.

Non compatible avec Clean 24".

Vendu par lots de 4.

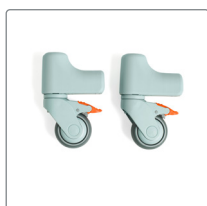

Roulettes de 75 mm

Blanc : Avant - 80209515. Arrière - 80209516

Vert : Avant - 80209513. Arrière - 80209514


Lorsqu'une hauteur d'assise extra basse est requise. Réduit la hauteur d'assise de 5 cm.

Montées sur Clean 44 cm en version standard.

Compatibles avec Clean 49 cm.

Vendues par paires.

Clean à hauteur variable uniquement

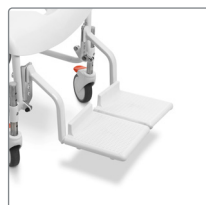

Repose-pieds rabattables vers le haut

80209250

Les repose-pieds peuvent être repliés et réglés en hauteur et sont amovibles. Compatibles avec Clean à hauteur variable. Vendus par paires.

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur la gamme complète et obtenir des informations supplémentaires concernant chaque accessoire, visitez www.etac.com.



Découvrez l'usage prévu de nos produits et notre actualité
en consultant www.etac.com



France Rehab
ZA du Haut Serroir
54690 Lay-Saint-Christophe
info@france-rehab.fr
www.france-rehab.fr
03 83 22 20 65

France Rehab
GROUPE EVRARD